

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	<b>Imunologická laboratoř</b>									
2										
3	Název	Zkratka	Primární vzorek	Množství vzorku	Stabilita při 18 -25°C	Stabilita při 2-8°C	Doba odezvy	Referenční meze	Označení akreditované metody (A)	SOP
4	<b>Imunoglobuliny</b>									
5	Imunoglobulin IgA	IGA	srážlivá nebo nesrážlivá (EDTA, heparin Li) žilní krev	150ul séra nebo plazmy (30ul + 120ul mrtvý objem)	krev: 24 hod sérum: 24 hod	krev: 48 hod sérum: 7 dní	5 dní	Věk (rok)      Rozmezi <1              0 - 0,83 g/l 1-3              0,2 - 1,0 g/l 3-6              0,27 - 1,95 g/l 6-9              0,34 - 3,05 g/l 9-11             0,53 - 2,04 g/l 11-13           0,58 - 3,58 g/l 13-15           0,47 - 2,48 g/l 15-19           0,61 - 3,49 g/l >19             0,85 - 4,99 g/l	A	SOP-IML-101
6	Podtřídy IgA IgA1 IgA2	IGA1 IGA2	srážlivá žilní krev	180ul séra (60ul + 120ul mrtvý objem)	krev: 8 hod sérum: 12 hod	krev: 24 hod sérum: 2 dny	7 dní	Věk (rok)      Rozmezi (g/l) IgA1              IgA2 <1              0 - 0,83              0,0 - 0,06 1-3              0,2 - 1,0              0,01 - 0,09 3-6              0,27 - 1,95           0,03 - 0,12 6-9              0,34 - 3,05           0,03 - 0,16 9-11             0,53 - 2,04           0,04 - 0,22 11-13           0,58 - 3,58           0,05 - 0,28 13-15           0,47 - 2,48           0,07 - 0,35 15-19           0,77 - 3,36           0,09 - 0,37 >19             0,77 - 2,28           0,07 - 1,14		SOP-IML-101
7	Imunoglobulin IgG	IGG	srážlivá žilní krev	150ul séra (30ul + 120ul mrtvý objem)	krev: 24 hod sérum: 24 hod	krev: 48 hod sérum: 8 dní	5 dní	Věk (rok)      Rozmezi <2              3,27 -12,70 g/l 2-4              4,68 - 12,50 g/l 4-6              5,32 - 13,40 g/l 6-8              4,54 -13,60 g/l 8-10             5,68 - 13,60 g/l 10-12           5,68 - 14,90 g/l 12-14           6,64 -14,90 g/l 14-19           5,50 -14,40 g/l >19             6,10 -16,16 g/l	A	SOP-IML-101
8	Podtřídy IgG IgG1 IgG2 IgG3 IgG4	IGG1 IGG2 IGG3 IGG4	srážlivá žilní krev	240ul séra (120ul + 120ul mrtvý objem)	krev: 24 hod sérum: 24 hod	krev: 48 hod sérum: 8 dní	7 dní	Věk (rok)      Rozmezi (g/l) IgG1      IgG2      IgG3      IgG4 2              1,94-8,42   0,23-3,00   0,19-0,85   0,005-0,78 2-4              3,15-9,45   0,36-2,25   0,17-0,68   0,01-0,54 4-6              3,06-9,45   0,60-3,45   0,10-1,22   0,018-1,13 6-8              2,88-9,18   0,44-3,75   0,15-0,85   0,004-0,99 8-10            4,32-10,20   0,72-4,30   0,13-0,85   0,019-0,93 10-12           4,23-10,60   0,76-3,55   0,17-1,73   0,016-1,15 12-14           3,42-11,50   1,00-4,55   0,28-1,25   0,037-1,36 14-19           3,15-8,55   0,64-4,95   0,23-1,96   0,110-1,57 >19            3,82-9,29   2,41-7,00   0,21-1,76   0,039-0,86		SOP-IML-101



	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Název	Zkratka	Primární vzorek	Množství vzorku	Stabilita při 18 -25°C	Stabilita při 2-8°C	Doba odezvy	Referenční meze	Označení akreditované metody (A)	SOP
3										
20	<b>Komplement</b>									
21	C1 inhibitor esterázy	C1IN	srážlivá i nesrážlivá (citrát) žilní krev	300 ul žilní krve, 150 ul séra/plazmy (20 ul séra + 130 mrtvý objem)	krev: 8 hod sérum/plazma: 12 hod	krev: 24 hod sérum/plazma: 8 dní	7 dní	0,22 - 0,38 g/l (plazma 0,19-0,32)		SOP-IML-103
22	C3 složka komplementu	C3	srážlivá žilní krev	300 ul žilní krve, 150 ul séra (20 ul séra + 130 mrtvý objem)	krev: 4 hod sérum: 12 hod	krev: 12 hod sérum: 3 dny	7 dní	0,75-1,4 g/l		SOP-IML-103
23	C4 složka komplementu	C4	srážlivá žilní krev	300 ul žilní krve, 150 ul séra (20 ul séra + 130 mrtvý objem)	krev: 4 hod sérum: 12 hod	krev: 12 hod sérum: 3 dny	7 dní	0,1-0,35 g/l		SOP-IML-103
24	Mannan vazající protein	MBP	srážlivá / nesrážlivá (heparin) žilní krev	200 ul žilní krve, 50 ul séra/plazmy (5 ul séra + 45 mrtvý objem)	krev: 8 hod sérum: 12 hod	krev: 12 hod sérum/plazma: 1 den	3 týdny	0-100 ng/ml		SOP-IML-025
25	<b>Buněčná imunita</b>									
26	T lymfocyty (CD3+)	Tl Tla	nesrážlivá (heparin, EDTA) žilní krev	100 ul nesrážlivé krve	krev: 48 hod	není doporučeno	5 dní	52-83 % 0,87 - 2,34 x 10e9 buněk /l		SOP-IML-301
27	Th lymfocyty (CD3+CD4+)	Th Tha	nesrážlivá (heparin, EDTA) žilní krev	100 ul nesrážlivé krve	krev: 48 hod	není doporučeno	5 dní	25-64 % 0,47 - 1,52 x 10e9 buněk /l		SOP-IML-301
28	Tc lymfocyty (CD3+CD8+)	Tc Tca	nesrážlivá (heparin, EDTA) žilní krev	100 ul nesrážlivé krve	krev: 48 hod	není doporučeno	5 dní	13-46 % 0,21 - 1,03 x 10e9 buněk /l		SOP-IML-301
29	B lymfocyty (CD19+)	Bl Bla	nesrážlivá (heparin, EDTA) žilní krev	100 ul nesrážlivé krve	krev: 48 hod	není doporučeno	5 dní	5-24 % 0,087- 0,445 x 10e9 buněk/l		SOP-IML-301
30	NK buňky (CD3-CD16+CD56+)	NK Nka	nesrážlivá (heparin, EDTA) žilní krev	100 ul nesrážlivé krve	krev: 48 hod	není doporučeno	5 dní	6-18 % 0,12 - 0,54 x 10e9 buněk/l		SOP-IML-301
31	NKT buňky (CD3+CD16+CD56+)	NKT NkTa	nesrážlivá (heparin, EDTA) žilní krev	100 ul nesrážlivé krve	krev: 48 hod	není doporučeno	5 dní	0-8 % 0,00 - 0,23 x 10e9 buněk/l		SOP-IML-301
32	Aktivované T lymfocyty (CD3+ HLA-DR+)	HLADR HLADA	nesrážlivá (heparin, EDTA) žilní krev	100 ul nesrážlivé krve	krev: 48 hod	není doporučeno	5 dní	Muži: 0,04 - 0,45 x 10e9 buněk/l Ženy: 0 - 40 let 0,034 - 0,321 x 10e9 buněk /l > 40 let 0,054 - 0,496 x 10e9 buněk /l		SOP-IML-301
33	T regulační lymfocyty (CD4+CD25+CD127)	TREG TREGA	nesrážlivá (heparin, EDTA) žilní krev	100 ul nesrážlivé krve	krev: 48 hod	není doporučeno	5 dní	5-10% 0,03 - 0,152 x 10e9 buněk/l		SOP-IML-303
34	HLA-B27	HLAB27	nesrážlivá (heparin, EDTA) žilní krev	100 ul nesrážlivé krve	krev: 48 hod	není doporučeno	5 dní	negativní		SOP-IML-304



	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Název	Zkratka	Primární vzorek	Množství vzorku	Stabilita při 18 -25°C	Stabilita při 2-8°C	Doba odezvy	Referenční meze	Označení akreditované metody (A)	SOP
3										
45	<b>Autoimunita</b>									
46	ANA (autoprotilátky proti jaderným antigenům)	ANAG ANAM ANAA	srážlivá / nesrážlivá (heparin, EDTA) žilní krev	150 ul žilní krve 50 ul séra/plazmy	krev: 12 hod sérum/plazma: 24 hod	krev: 24 hod sérum/plazma: 7 dní	14 dní	negativní (1:100)		SOP-IML-201
47	ANA blot: nRNP/Sm, Sm, SSA, SSB, Ro52, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, centroméra B, PCNA, dsDNA, nukleozómy, histony, ribozomální protein B, M2, DSF70	ANAB	srážlivá / nesrážlivá (heparin, EDTA) žilní krev	100 ul žilní krve 20 ul séra/plazmy	krev: 12 hod sérum/plazma: 24 hod	krev: 24 hod sérum/plazma: 14 dní	14 dní	negativní		SOP-IML-501
48	Myositida / sklerodermie blot: Jo-1, Pl-7, Pl-12, SRP, Mi-2, Ku, Scl-70	MSCLB	srážlivá / nesrážlivá (heparin, EDTA) žilní krev	100 ul žilní krve 20 ul séra/plazmy	krev: 12 hod sérum/plazma: 24 hod	krev: 24 hod sérum/plazma: 3 dny	14 dní	negativní		SOP-IML-502
49	Protilátky proti dvouvláknové DNA (ELISA)	DSDNA	srážlivá / nesrážlivá (heparin, EDTA) žilní krev	100 ul žilní krve 50 ul séra/plazmy (10 ul séra/plazmy)	krev: 12 hod sérum: 24 hod	krev: 24 hod sérum: 5 dní	4 dny	0 - 25 U/ml		SOP-IML-011
50	Protilátky proti dvouvláknové DNA (IF)	DSDNAIF	srážlivá / nesrážlivá (heparin, EDTA) žilní krev	150 ul žilní krve 50 ul séra/plazmy	krev: 12 hod sérum/plazma: 24 hod	krev: 24 hod sérum/plazma: 7 dní	14 dní	negativní (titr 1:10)		SOP-IML-203
51	Protilátky proti extrahovatelným jaderným antigenům screen (ENA screen)	ENASC	srážlivá / nesrážlivá (heparin, EDTA) žilní krev	100 ul žilní krve 50 ul séra/plazmy (10 ul séra/plazmy)	krev: 12 hod sérum: 24 hod	krev: 24 hod sérum: 5 dní	4 dny	0 - IIP		SOP-IML-011
52	Protilátky proti SS-A (Ro)	SSA	srážlivá / nesrážlivá (heparin, EDTA) žilní krev	100 ul žilní krve 50 ul séra/plazmy (10 ul séra/plazmy)	krev: 12 hod sérum: 24 hod	krev: 24 hod sérum: 5 dní	4 dny	0 - 15 U/ml		SOP-IML-011
53	Protilátky proti SS-B (La)	SSB	srážlivá / nesrážlivá (heparin, EDTA) žilní krev	100 ul žilní krve, 50 ul séra/plazmy (10 ul séra/plazmy)	krev: 12 hod sérum: 24 hod	krev: 24 hod sérum: 5 dní	4 dny	0 - 15 U/ml		SOP-IML-011
54	Protilátky proti Sm	SM	srážlivá / nesrážlivá (heparin, EDTA) žilní krev	100 ul žilní krve, 50 ul séra/plazmy (10 ul séra/plazmy)	krev: 12 hod sérum: 24 hod	krev: 24 hod sérum: 5 dní	4 dny	0 - 15 U/ml		SOP-IML-011
55	Protilátky proti komplexu Sm/RNP	RNPSM	srážlivá / nesrážlivá (heparin, EDTA) žilní krev	100 ul žilní krve, 50 ul séra/plazmy (10 ul séra/plazmy)	krev: 12 hod sérum: 24 hod	krev: 24 hod sérum: 5 dní	4 dny	0 - 15 U/ml		SOP-IML-011
56	Protilátky proti Scl-70	SCL70	srážlivá / nesrážlivá (heparin, EDTA) žilní krev	100 ul žilní krve, 50 ul séra/plazmy (10 ul séra/plazmy)	krev: 12 hod sérum: 24 hod	krev: 24 hod sérum: 5 dní	4 dny	0 - 15 U/ml		SOP-IML-011
57	Protilátky proti Jo-1	JO1	srážlivá / nesrážlivá (heparin, EDTA) žilní krev	100 ul žilní krve 50 ul séra/plazmy (10 ul séra/plazmy)	krev: 12 hod sérum: 24 hod	krev: 24 hod sérum: 5 dní	4 dny	0 - 15 U/ml		SOP-IML-011
58	Protilátky proti nukleozomům (ANuA)	ANUA	srážlivá / nesrážlivá (heparin, EDTA) žilní krev	100 ul žilní krve 50 ul séra/plazmy (10 ul séra/plazmy)	krev: 12 hod sérum: 24 hod	krev: 24 hod sérum: 5 dní	4 dny	0 - 20 U/ml		SOP-IML-011
59	Protilátky proti centroméře B	CENTRB	srážlivá / nesrážlivá (heparin, EDTA) žilní krev	100 ul žilní krve 50 ul séra/plazmy (10 ul séra/plazmy)	krev: 12 hod sérum: 24 hod	krev: 24 hod sérum: 5 dní	4 dny	0 - 10 U/ml		SOP-IML-011





	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Název	Zkratka	Primární vzorek	Množství vzorku	Stabilita při 18 -25°C	Stabilita při 2-8°C	Doba odezvy	Referenční meze	Označení akreditované metody (A)	SOP
3										
71	<b>Autoimunitní hepatopatie</b>									
72	Anti hladký sval (ASMA) IgG IF	ASMA	srážlivá / nesrážlivá (heparin, EDTA) žilní krev	150 ul žilní krve 50 ul séra/plazmy	krev: 12 hod sérum/plazma: 24 hod	krev: 24 hod sérum/plazma: 7 dní	14 dní	negativní (1:40)		SOP-IML-205
73	Anti mitochondrie (AMA) IgG IF	AMA	srážlivá / nesrážlivá (heparin, EDTA) žilní krev	150 ul žilní krve 50 ul séra/plazmy	krev: 12 hod sérum/plazma: 24 hod	krev: 24 hod sérum/plazma: 7 dní	14 dní	negativní (1:40)		SOP-IML-205
74	Protilátky proti mitochondriím subtyp (AMA - M2)	AMAM2	srážlivá / nesrážlivá (heparin, EDTA) žilní krev	100 ul žilní krve 50 ul séra/plazmy (10 ul séra/plazmy)	krev: 12 hod sérum: 24 hod	krev: 24 hod sérum: 5 dní	4 dny	0 - 10 U/ml		SOP-IML-016
75	Protilátky proti mikrosomům jater a ledvin (LKM1) IgG	LKM1	srážlivá / nesrážlivá (heparin, EDTA) žilní krev	100 ul žilní krve 50 ul séra/plazmy (10 ul séra/plazmy)	krev: 12 hod sérum: 24 hod	krev: 24 hod sérum: 5 dní	4 dny	0 - 10 U/ml		SOP-IML-016
76	Protilátky proti solubilnímu jaternímu antigenu (SLA)	SLA	srážlivá / nesrážlivá (heparin, EDTA) žilní krev	100 ul žilní krve 50 ul séra/plazmy (10 ul séra/plazmy)	krev: 12 hod sérum: 24 hod	krev: 24 hod sérum: 5 dní	4 dny	0 - 10 U/ml		SOP-IML-016
77	Jaterní blot: M2, M2-3E (BPO), SP-100, PML, gp210, LKM-1, LC-1 SLA/LP, Ro-52	JATRAB			krev: 12 hod sérum/plazma: 24 hod	krev: 24 hod sérum/plazma: 14 dní	14 dní	negativní		SOP-IML-501
78	<b>Vaskulitidy</b>									
79	ANCA (autoprotilátky proti cytoplasmě neutrofilů)	ANCAE ANCAF	srážlivá / nesrážlivá (heparin, EDTA) žilní krev	150 ul žilní krve 50 ul séra/plazmy	krev: 12 hod sérum/plazma: 24 hod	krev: 24 hod sérum/plazma: 7 dní	14 dní	negativní (1:20 )		SOP-IML-202
80	Protilátky proti myeloperoxidáze (MPO)	MPO	srážlivá / nesrážlivá (heparin, EDTA) žilní krev	100 ul žilní krve 50 ul séra/plazmy (10 ul séra/plazmy)	krev: 12 hod sérum: 24 hod	krev: 24 hod sérum: 5 dní	4 dny	0 - 5 U/ml		SOP-IML-012
81	Protilátky proti proteináze 3 (PR3)	PR3	srážlivá / nesrážlivá (heparin, EDTA) žilní krev	100 ul žilní krve, 50 ul séra/plazmy (10 ul séra/plazmy)	krev: 12 hod sérum: 24 hod	krev: 24 hod sérum: 5 dní	4 dny	0 - 5 U/ml		SOP-IML-012
82	Protilátky proti bazální membráně glomerulů (GBM)	GBM	srážlivá / nesrážlivá (heparin, EDTA) žilní krev	100 ul žilní krve, 50 ul séra/plazmy (20 ul séra/plazmy)	krev: 12 hod sérum: 24 hod	krev: 24 hod sérum: 5 dní	4 dny	0 - 20 U/ml		SOP-IML-012
83	ANCA profil: PR3, MPO, elastáza, katepsin lysozym, laktoferin, BPI	ANCAT	srážlivá / nesrážlivá (heparin, EDTA) žilní krev	100 ul žilní krve, 50 ul séra/plazmy (10 ul séra/plazmy)	krev: 12 hod sérum: 24 hod	krev: 24 hod sérum: 5 dní	3 týdny	0 - 0,9 IP		SOP-IML-023
84	<b>Rvmatologie</b>									
85	Revmatoidní faktor (RF) IgA, IgM, IgG	RFM RFA RFG	srážlivá / nesrážlivá (heparin, EDTA) žilní krev	100 ul žilní krve, 50 ul séra/plazmy (10 ul séra/plazmy)	krev: 12 hod sérum: 24 hod	krev: 24 hod sérum: 5 dní	4 dny	0 - 20 IU/ml		SOP-IML-017
86	Protilátky proti cyklickým citrulinovaným peptidům IgG	CCP	srážlivá / nesrážlivá (heparin, EDTA) žilní krev	100 ul žilní krve, 50 ul séra/plazmy (10 ul séra/plazmy)	krev: 12 hod sérum: 24 hod	krev: 24 hod sérum: 5 dní	4 dny	0 - 20 IU/ml		SOP-IML-017



